

SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

Nålelektrod för gynekologi (110 mm skaft)

Nålelektrod nål i volfram för punktdiatermi. Använd lägst möjliga uteffekt för önskat resultat och anpassa uteffekten till vävnadens beskaffenhet och typ av ingrepp.

| Art nr | Färg | Nål dia | Nål längd | Skaft | Fattning dia | Antal/förp |
|---------|-------|---------|-----------|-------|--------------|------------|
| DLP-N11 | Röd | 0,8 | 15 | 110 | 2,4 | 10 |
| DLP-U11 | Svart | 0,2 | 15 | 110 | 2,4 | 10 |

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Elektrodförlängare för gynekologi

DXT-S06 och DXT-L09 används som elektrodförlängare vid slyngdiatermikonisering för att eliminera risken för lateralt tryck på elektroden. DXT-S06 rekommenderas vid direkt visualiserat ingrepp för att inte operatörens hand ska störa det visuella fältet. DXT-L09 rekommenderas vid kolposkopiskt visualiserat ingrepp för att inte pennan skall vara i vägen för kolposkopet.

| Art nr | Färg | Förlängning i mm | Fattning diameter | Antal/förp |
|---------|------|------------------|-------------------|------------|
| DLP-X10 | Blå | 100 | 2,4 | 10 |
| DXT-S06 | Blå | 60 | 2,4 | 10 |
| DXT-L09 | Blå | 90 | 2,4 | 10 |

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Material

| | Nålelektrod | Förlängare |
|-----------|----------------|----------------|
| Nål | Volfram | - |
| Skaft | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
| Isolering | Polyolefin | Polyolefin |

Observera

- Nålelektroden får inte vridas/böjas.
- Undvik direkt kontakt med metall.
- Använd isolerade kirurgiska instrument.
- Rengör endast med fuktad gasväv.
- **Får ej omsteriliseras eller återanvändas.**

1711