

SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

Umbili-cath® steril navelkateter i silikon för neonatalpatienter

Silikonkateter för administration via naveln för neonatalpatienter. Katetern har en rundad ändpunkt med två utloppshål vilket underlättar vätskeflödet. Katetern är graderad i 1 cm intervall och är röntgentät. Katetern är tillverkad i silikon och kan användas kontinuerligt i 30 dagar. Umbili-cath kateter med enkel lumen har en anslutning med två infusionsportar och kran. Umbili-cath kateter med dubbel lumen har en anslutning med två infusionsportar och kran (polykarbonat) samt en anslutning med injektionsmembran.

Umbili-cath navelkateter tillverkas i **silikon** som är ett avancerat material med följande egenskaper:

- extra mjukt och elastiskt
- biokompatibelt, vidhäftar ej / irriterar inte vävnaden
- minskar risken för infektion och är ej trombogent
- är hydrofobt och behöver inte vätas före användning
- innehåller ej mjukgörare som kan frigöras under behandlingen
- har hög stabilitet och bibehåller elasticiteten under lång tid
- kan användas lång tid utan byte

Art nr	Beskrivning	French	Längd	Ytter-diameter	Inner-diameter	Volym	Antal per förp
4173505	Navelkateter enkel lumen	3,5	34 cm	1,27 mm	0,64 mm	0,15 ml	10 st
4175005	Navelkateter enkel lumen	5,0	34 cm	1,70 mm	0,64 mm	0,25 ml	10 st
4273505	Navelkateter dubbel lumen	3,5	34 cm	1,70 mm	1,27 mm	0,15 ml	5 st
4275005	Navelkateter dubbel lumen	5,0	34 cm	2,44 mm	1,70 mm	0,25 ml	5 st

Kateterns längd räknas från ändpunkten till anslutningen.

Observera

- Katetern är mjuk och känslig för skada.
- Följ klinikens protokoll för administration av navelkateter.
- Var försiktig så att inte katetern skadas av operationsinstrument eller högt injektionsstryck.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.
- Får ej omsteriliseras eller återanvändas.