

## SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

### Uri-cath® steril urinrörskateter i silikon för neonatal- och barnpatienter

Extra mjuk och biokompatibel silikonkateter för urindränning. Katetern har en mjuk ändpunkt med ett hål och två motsatta sidohål 0,5 resp. 1,0 cm (gäller ej 3,5 Fr) från ändpunkten. Den mjuka katetern placeras utan trauma eller risk för perforation. Uri-Cath är röntgentät. Uri-Cath är 34 cm lång och har en infusionsanslutning. Uri-Cath SET innehåller en 34 cm lång urinrörskateter ansluten via en trevägskran (vars ena port har injektionsmembran) med 100 cm anslutningsslang till en 150 ml graderad mätbehållare för kontinuerlig övervakning av urinvolymen. Mätbehållaren har ett injektionsmembran i ovan delen och en infusionsanslutning med kran i nederdelen.

Uri-Cath urinrörskateter tillverkas i silikon som är ett avancerat material med följande egenskaper:

- extra mjukt och elastiskt
- biokompatibelt, vidhäftar ej / irriterar inte vävnaden
- minskar risken för infektion
- är hydrofob och behöver inte vätas före användning
- innehåller ej mjukgörare som kan frigöras under behandlingen
- har hög stabilitet och bibehåller elasticiteten under lång tid
- kan användas lång tid utan byte (29 dagar enligt EN ISO 10993)

Art nr	Beskrivning	French	Längd	Antal/ förp.	Kateter YD	Kateter ID	Katetervol
4193505	Urinrörskateter	3,5	34 cm	10 st	1,27 mm	0,64 mm	0,18 ml
4193509	Urinrörskateter SET	3,5	34 cm	10 st	1,27 mm	0,64 mm	0,18 ml
4195005	Urinrörskateter	5,0	34 cm	10 st	1,70 mm	0,76 mm	0,23 ml
4195009	Urinrörskateter SET	5,0	34 cm	10 st	1,70 mm	0,76 mm	0,23 ml
4198005	Urinrörskateter	8,0	34 cm	10 st	2,44 mm	1,27 mm	0,48 ml
4198009	Urinrörskateter SET	8,0	34 cm	10 st	2,44 mm	1,27 mm	0,48 ml

YD = ytterdiameter, ID = innerdiameter

### OBSERVERA

- Katetern är mjuk och känslig för skada.
- Följ klinikens protokoll för administration av urinrörskateter.
- Var försiktig så att inte katetern skadas av operationsinstrument eller högt injektionstryck.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.
- Får ej omsteriliseras eller återanvändas.

### CORTEC MEDICAL AB

Kanalgatan 3, 211 40 Malmö, tel: 040 664 59 50, fax: 040 788 63

[kundservice@cortec.com](mailto:kundservice@cortec.com), [www.cortec.com](http://www.cortec.com)

Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.