

SNABBINFO OM ANVÄNDNING

Vi hänvisar till CE-certifierad användarinstruktion som finns i varje förpackning.

OptiSpec® sladdfri clip-on-LED-lampa till spekulum

En vit, liten LED-lampa med clip-on-funktion som används tillsammans med spekulum för att ge ett vitt, klart och starkt ljus på cervix. Lampan monteras enkelt på övre delen av spekulum. Lampan är utformad på ett sätt som gör att den inte stör det visuella arbetsfältet. Dessutom är den sladdfri.

Kan användas vid exempelvis exempelvis gynekologiska undersökningar eller cellprov.

Passar på de allra flesta spekulum.

Antal per förpackning: 25

ANVÄNDNING

Sätt på lampan genom att dra ut den randiga flärpen helt och hållet från lampan. Lampan tänds direkt. Fäst lampan på övre delen av spekulum så att önskat ljus erhålls.

OBSERVERA

- Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.
- **OptiSpec® är en steril engångsprodukt och får ej omsteriliseras eller återanvändas.**



Mercuriiparken 2, 211 20 Malmö, tel: 040 664 59 50,
kundservice@cortec.com , www.cortec.com
Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.